



## PRO-DENSE™ Bone Graft Substitute

Wright Medical Technology, Inc.  
P.O. Box 200  
Arlington, TN 38002  
USA

EC REP  
Wright Medical EMEA  
Krijgsman 11  
1186 DM Amstelveen  
Nederländerna

### Blandningsinstruktion


**OBSERVERA.** Tillsätt inga andra ämnen till transplantatet. Användning av alternativa blandningslösningar och/eller tillsättning av andra substanser till blandningen kan förändra produktens egenskaper, säkerhet och effektivitet.

Förberedelse av transplantationsområde och tillbehör

1. (FRIVILLIGT) Använd böjningsverktyget för att böja nålen (där den levereras med förpackningen). Det finns två böjningskanaler. HIGH: Betydande böjning och LOW: Måttlig böjning.



2. Sätt nålen i defekten med hjälp av fluoroskopisk genomlysning, innan blandningsproceduren påbörjas.

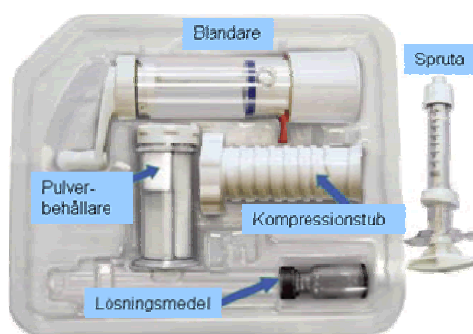

3. Ta bort övre delen av mixern (som håller veven).



4. Tillsätt allt pulver genom att först skruva fast mixern på pulverbehållaren.

**OBSERVERA:** Vänd inte pulverbehållaren upp och ned förrän den sitter fast på mixern



5. Tillsätt **allt** lösningsmedel



8. Skruva fast mixerdelen med veven på mixern. Vakuumslang behöver inte används.



7. Blanda i 30 sekunder (ca 30 varv). Avsluta med tre snabba varv. Kontrollera i botten av mixern att allt material har blandats ordentligt.

**Observera: Injicera blandningen inom 3-5 min**

8. Ta bort toppen och torka av överskott



9. Ta bort den röda spärren



10. Rotera den vita hylsan för att exponera sprutöppningen



11. Håll mixern på sidan och skjut vinklat in den gängade drivtappen tills den är på plats



12. Skruva därefter in den gängade drivtappen tills transplantatet börjar komma in i sprutöppningen



13. Ta av hatten från sprutan. Det är viktigt att spara denna steril. Den ska senare återmonteras (se punkt 16)



14. Passa in sprutan vertikalt



15. Fortsätt att rotera drivtappen tills sprutan är fylld



16. Ta bort sprutan och sätt på den vita hatten.

*Notera:* för 20cc förpackning, repetera steg 13-16 för extra spruta



17. Montera nålen på sprutan. Undvik att överfylla och injicera med för högt tryck. *Notera:* Om injiceringen blir alltför svår se 18a och 18b nedan.



#### Mekanisk hjälp

18a. För att aktivera vridmekanismen, dra den vita kragen mot övre delen av sprutan tills den knäpps fast.



18b. Vrid kolvhandtaget på sprutan medurs för att fortsätta injiceringen

**Observera: Benmaterialet stelnar inom 20-30 minuter**

 **OSSANO**<sup>®</sup>  
SCANDINAVIA

Djurgårdsslätten 96, 115 21 Stockholm  
Tel +46 8 665 10 18 · Fax +46 8 661 32 42  
E-mail: info@ossano.se · Internet: www.ossano.se