

Användarmanual för eldriven Benlyft 2009-01





VARNING

Vid användning av utrustningen iakttag försiktighet så att översträckning av patientens extremiteter ej sker. Var noga med att lyftens längre benpar placeras under patienten för att undvika att lyften tippar.

Laddning

Utrustningen bör kontinuerligt laddas exempelvis över natt med den medföljande adaptorn. Batteriet är fulladdat vid grönt ljus från indikatorn. Säkerhetsströmbrytaren (den röda knappen) utlöses genom att knappen trycks in. Återställs genom att man vrider knappen i pilarnas riktning.



Vid lyft i vrist av patientens ena ben använd band med artikelnr: 2006-50. Placera benlyften vid operationsbordets långsida på den operativa sidan med det längre benparet under op. bordet. Lås lyftens hjul och höj med hjälp av lyftens handkontroll benet till önskad nivå.



Vid lyft i hålfoten av patientens ena ben använd band med artikelnr: 2006-60. Placera benlyften vid operationsbordets långsida på den operativa sidan med det längre benparet under op. bordet. Lås lyftens hjul och höj med hjälp av lyftens handkontroll benet till önskad nivå. Eventuellt kan bandet behöva säkras med en tejp så att bandet ej glider av foten.



Vid samtidigt lyft av patientens båda ben använd det medföljande tvärstaget genom att placera det på lyftarmen. Använd sedan band 2006-50 alternativt 2006-60. Placera benlyften vid operationsbordets fotända med det längre benparet under op. bordet. Höj benen till önskad nivå med hjälp av lyftens handkontroll.



Vid lyft i abdominal/bukläge använd det medföljande tvärstaget genom att placera det på lyftarmen. Placera benlyften vid operationsbordets långsida på den operativa sidan med det längre benparet under op. bordet. Använd band med artikelnummer: 2006-70. Det större bandet placeras proximalt om knäet och det mindre placeras i hålfoten. Alternativt kan bandet med artikelnummer 2006-50 användas och placeras då runt vristen på benet.

Vid rengörning av lyften använd en mjuk trasa med diskmedel, därpå ytdesinfektion.

| Produkt | Artikelnummer |
|--|----------------------|
| Lyftband för vrist 10 st/FP | 2006-50 |
| Lyftband för hålfot/ velcro fästning 10 st/FP | 2006-60 |
| Lyftband för buk läge 1st/FP | 2006-70 |

- Garantitid 1 år
- Batteriets uppskattade livslängd ca 3år
- Benlyftens max lyftkapacitet 120 kg